



Steunzolen



U heeft steunzolen nodig

Steunzolen zijn hulpmiddelen die individueel voor uw voeten worden gemaakt. Ze zijn er in diverse uitvoeringen, altijd afhankelijk van uw klachten: soms correctief (correctie van voetstand), soms ondersteunend (het tegengaan van het doorzakken van de voet), maar ook puur op comfort gericht. Uiteraard moeten steunzolen altijd in confectieschoenen passen: van comfortschoenen tot werkschoenen. Uw schoenen moeten wel geschikt zijn om steunzolen in te dragen. Wij geven u altijd een schoenadvies mee waar uw schoenen aan moeten voldoen.

Aanmeten van steunzolen

U maakt via de centrale afsprakenlijn (077-3517258) met ons een afspraak voor een intake. Tijdens de intake nemen we alle gegevens met u door: u vertelt ons alles over uw voetklachten en uw wensen. Daarna doen we het uitgebreide onderzoek en maken we afhankelijk van uw klachten 2D, 3D of gips-afdrukken. Ook een insole drukmeting en een loopanalyse behoren tot de mogelijkheden, indien hier een indicatie voor is. We sluiten de intake af met informatie over de levertijd en de kosten.

Vergoedingen

Zorgverzekeraars vergoeden vaak een deel van de kosten van steunzolen. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Dit is bij elke zorgverzekeraar anders. In uw polisvoorwaarden leest u hoeveel uw zorgverzekeraar vergoedt. Steunzolen vallen buiten het eigen risico, dus uw eigen risico wordt niet aangesproken voor dit product. Heeft u vragen over uw zorgpolis, dan kijken wij graag met u mee.

QR-code

Scan de QR-code om te zien hoe wij steunzolen aanmeten.






Veelgestelde vragen

Wat kost een paar steunzolen?

Scan de QR-code voor onze actuele prijslijst.

Wat is de levertijd van een paar steunzolen?

De levertijd van steunzolen is doorgaans twee weken.

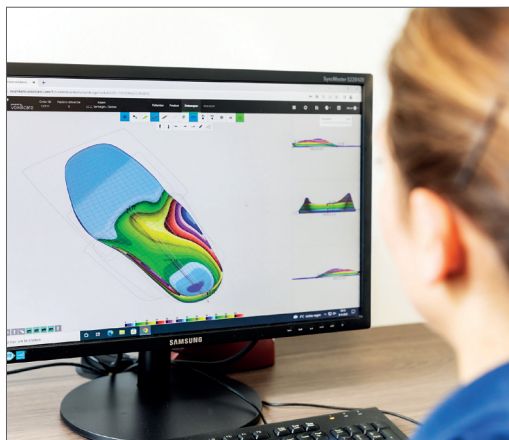

Wat is de levensduur van een paar steunzolen?

De levensduur van een paar steunzolen is afhankelijk van:

- Voetafwijking
- Leeftijd
- Gewicht
- Beroep
- Groei
- Gebruiksintensiteit
- Materiaal

De gemiddelde levensduur van steunzolen is twee jaar.

Passen steunzolen in alle schoenen?

Bij het aanmeten van steunzolen wordt er van de bestaande binnenzool van de schoen waarin u de steunzolen het vaakst zal dragen, een patroon gemaakt. Wilt u ze in meerdere schoenen dragen, dan raden wij u aan om bij het afleveren van de steunzolen uw schoenen mee te nemen waar ze ook in moeten passen. We kunnen dan kijken of we de steunzolen ook daar passend in kunnen maken.

Mag ik de steunzolen ook in werkschoenen dragen?

Nee, uw dagelijkse steunzolen mogen niet in werkschoenen worden gedragen. Hiervoor moeten gecertificeerde steunzolen worden gemaakt, die geregistreerd zijn en worden gekoppeld aan uw werkschoenen.

Moet ik nog op controle komen?

Wij bieden een jaarlijkse controle aan zonder extra kosten. Daarnaast kunt u op eigen initiatief altijd een afspraak maken voor aanvullende controles.

Bij kinderen tot en met zestien jaar worden steunzolen elke drie à vier maanden gecontroleerd. Hiervoor maakt u zelf een afspraak.

Reumkens Voet & Zorg, al meer dan 65 jaar een sterk merk

Al meer dan 65 jaar verbeteren wij uw bewegingsvrijheid en kwaliteit van leven door onze persoonlijke aanpak, zorg en oplossingsgerichtheid bij voet-, enkel-, knie-, heup- en rugklachten. Wij koppelen de nieuwste technieken aan vertrouwde, persoonlijke zorg. Onze spreekuren zijn uitsluitend op afspraak, zodat wij uw voetprobleem alle aandacht kunnen geven.

Centrale afsprakenlijn: 077 - 351 72 58

Onze vestigingen:

Venlo

Hagerhofweg 16
5912 PN Venlo

Roggel

Kerkstraat 18
6088 EG Roggel
(Gezondheidscentrum Roggel)

Venray

Langstraat 54
5801 AE Venray
(Knooppunt Centrum voor Gezondheid)

Belfeld

Julianastraat 21
5951 CG Belfeld
(Van Lier Schoenen)

Helden-Panningen

Steenbakkersstraat 6
5981 WT Panningen
(Medisch Centrum Pantaleon)

Sevenum

Sondertseveld 6
5975 TP Sevenum
(Praktijk voor fysio- en
manuele therapie Marcel Jacobs)

**Kijk op onze website voor
de openingstijden en
routebeschrijving:**
www.reumkensvoetenzorg.nl

U kunt ons ook via mail bereiken:
info@reumkensvoetenzorg.nl

